

DOĞRU ÖLÇÜM YAPMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

- ❖ *ELLER ILIK SU İLE YIKANMIŞ VE KURULANMIŞ OLMALIDIR.*
- ❖ *ISLAK MENDİL, ALKOL , KOLONYALI MENDİL KULLANILMAMALIDIR.*
- ❖ *KAN ALIRKEN PARMAK UCUNA ÇOK FAZLA BASTIRMAK VEYA SIKMAK YANLIŞ UYGULAMADIR.*
- ❖ *ÖLÇÜM İÇİN YETERLİ KANIN STRİPE ÇEKİTİRİLDİĞİ NUMUNE GÖZLEM PENCERESİNDEN GÖZLENMELİDİR..*
- ❖ *YENİ BİR KUTU STRİP AÇILDIĞINDA İLK OLARAK CİHAZA KOD KARTI İLE KODLAMA YAPILMALIDIR.*
- ❖ *STRİP ŞİŞELERİ ODA SICAKLIĞINDA TUTULMALIDIR*
- ❖ *STRİP ŞİŞELERİNİN KAPAKLARI KAPALI TUTULMALIDIR.*
- ❖ *KAPAĞI AÇILAN HER STRİP ŞİŞESİ 3 AY (90 GÜN) İÇİNDE TÜKETİLMELİDİR*
- ❖ *STRİPLERİN SON KULLANMA TARİHLERİNE DİKKAT EDİLMELİDİR.*
- ❖ *HER LANSET (İĞNE) TEK KULLANIMLIKTIR.*
- ❖ *LANSET KALEMİNDE RAKAM KÜÇÜLDÜKÇE DELME DERİNLİĞİ AZALIR.*

CİHAZ UYARI MESAJLARI

- *E-B ÖLÇÜM İÇİN UYGUN OLMAYAN PİL SEVİYESİ UYARISI*
- *E-C SİSTEM HATASI UYARISI*
- *E-U KULLANILMIŞ STRİP UYARISI*
- *E-T SICAKLIK UYARISI*
- *E-O HATALI STRİP UYARISI*
- *E-E CİHAZLA İLGİLİ PROBLEM*

YAPILMASI GEREKENLER

- PİL YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMELİ*
- KOD KARTI İLE TEKRAR KODLAMA YAPILMALI*
- ŞİŞEDEN YENİ BİR STRİP ALARAK ÖLÇÜM YAPILMALI*
- CİHAZ ÖLÇÜM İÇİN UYGUN SICAKLIĞA GETİRİLMELİ*
- YETKİLİ BAYİ YA DA İTHALATÇI FİRMA İLE BAĞLANTIYA GEÇİLMELİ*
- YETKİLİ BAYİ YA DA İTHALATÇI FİRMA İLE BAĞLANTIYA GEÇİLMELİ*

