

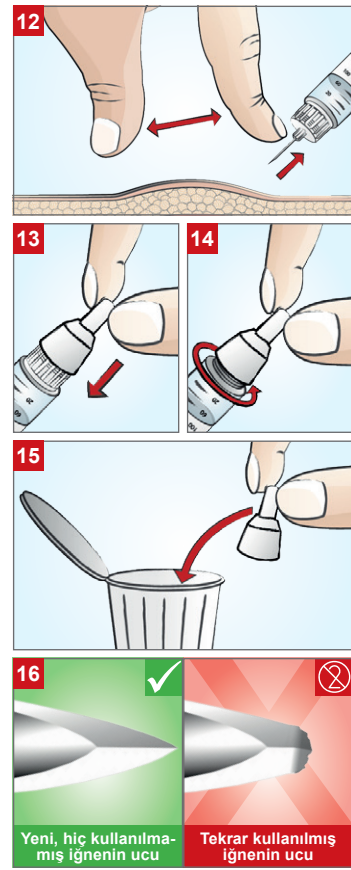


IME-FINE

Kalem Tipi İnsülin İğneleri

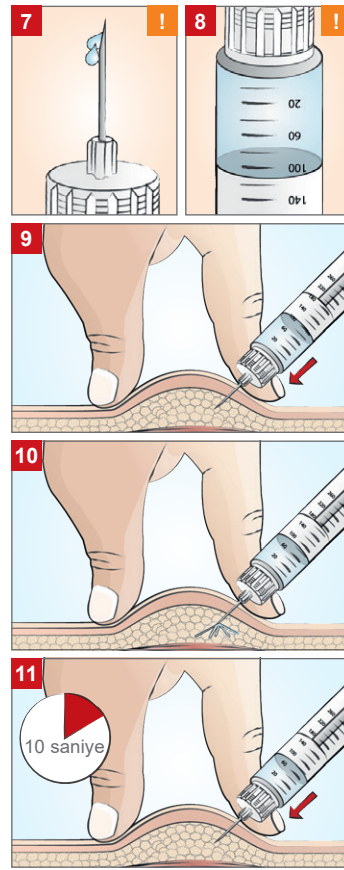

İnsülin iğnesinin yapılması

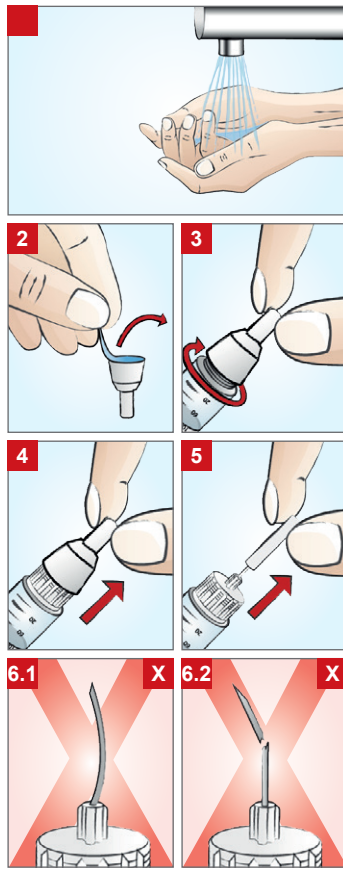

Genel Hazırlıklar (Ev ortamında yapılır)

- 1 Ellerinizi ılık su ve sabun ile yıkayın, sonra durulayın ve iyice kurulayın.

İğnenin insülin tüpüne takılması

- 2 Tüpün kapağındaki emniyet folyosunu çıkarın.
- 3 İğneyi saat yönünde çevirerek insülin tüpüne takın.
- 4 Tüpün kapağını çıkarın ve bir kenarda muhafaza edin.
- 5 İğnenin ucundaki koruyucuyu çıkarın.

İğnenin ve insülin tüpünün hazırlanması

- 6 İğneyi hasarlar (eğilme, kırılma vb.) yönünden kontrol edin.
- 7 Tüpteki havanın alınması: Enjektöre 1-2 birim insülin çekin ve 1-2 damlasını iğnenin ucundan dışarı fişkırtın.
- 8 Gerekli insülin dozajını ayarlayın.

İnsülin iğnesinin yapılması (Uygulama örneği)

Lütfen iğneyi yapmadan önce, doğru yapılış tekniğini bir sağlık uzmanından öğrenin.

- 9 Enjektöre edilecek cildi yeterince katlayın ve iğneyi cilde batırın.
- 10 Pistonu yavaş yavaş dibine kadar bastırıp insülini enjektöre edin.
- 11 Enjeksiyondan sonra iğneyi 10 saniye cildin içinde bekletin.
- 12 İğneyi ciltten çıkarın ve aynı anda katladığınız cildi serbest bırakın.

Enjeksiyondan sonra

- 13 Kapağı iğnenin üzerine yerleştirin.
- 14 İğneyi saat yönünün tersine çevirerek insülin tüpünden çıkarın.
- 15 Kullanılmış iğneleri yerel düzenlemelere göre bertaraf edin.

Kalem tipi insülin iğneleri tek kullanımlıktır!

- 16 Tekrar kullanılan iğnenin kalitesi ve güvenilirliği azalır.

İşaretler ve Semboller



Üretici



Üretim Tarihi



Avrupa Topluluğu Temsilcisi



Kullanım kılavuzuna uyun



Son Kullanma Tarihi



Parti No.



Tek kullanımlıktır



Etilen oksit ile steril edilmiştir



Bu ürün, 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği şartlarına uygundur.

IME-FINE

Kalem Tipi İnsülin İğneleri

Mevcut boyutlar:

- 31G x 4 mm
- 31G x 5 mm
- 31G x 6 mm
- 31G x 8 mm
- 29G x 12 mm



Ningbo Caremed Medical Products Co., Ltd.
No. 79 Jitang Road South Side
Hangzhou Bay New Zone, 315336 Ningbo, China

Shanghai International Holding Corp.
GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Uluslararası müşteriler için bilgi:
Yerel distribütörünüzün adres bilgileri ambalajın üzerindedir.

Ticari Marka Sahibi & Dağıtım:






IME-DC GmbH
Fuhmannstraße 11
95030 Hof | Germany

Tel: +49 9281 | 85 01 6-0
Faks: +49 9281 | 85 01 6-100
E-Posta: info@imedc.de
Web: www.imedc.de

IME-FINE Pen Kanülen



Durchführung einer Insulininjektion

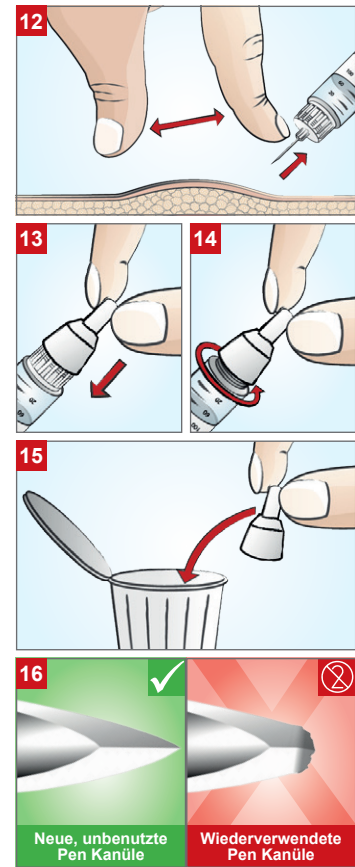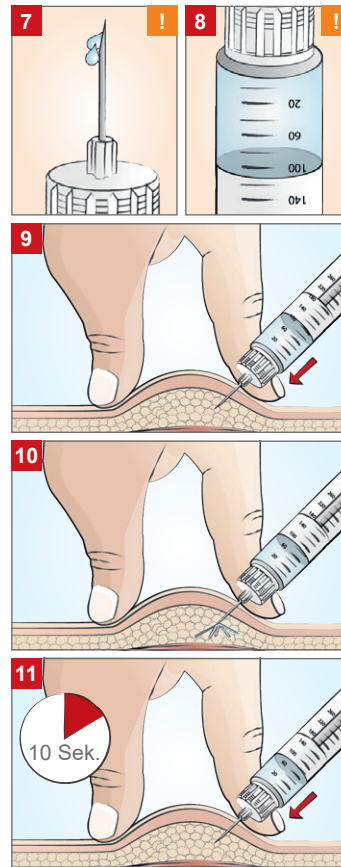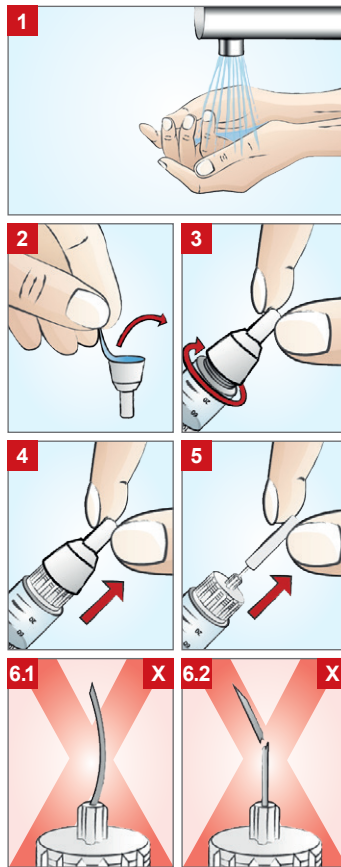

Allgemeine Vorbereitung (Heimpflege-Bereich)

- 1 Hände mit lauwarmen Wasser und Seife waschen. Anschließend Hände abspülen und gründlich abtrocknen.

Aufschauben der Pen Kanüle auf Insulin-Pen

- 2 Entfernen der Schutzfolie vom Blister.
- 3 Pen Kanüle im Uhrzeigersinn auf den Insulin-Pen drehen.
- 4 Blister abziehen und aufbewahren.
- 5 Schutzkappe von der Pen Kanüle entfernen.

Vorbereitung der Pen Kanüle sowie des Insulin-Pens

- 6 Pen Kanüle auf Schäden kontrollieren (verbogen, abgebrochen, etc.).
- 7 Entlüften: 1-2 Einheiten Insulin aufziehen und 1-2 Tropfen aus der Pen Kanüle ausspritzen.

- 8 Zu spritzende Insulinmenge einstellen.

Durchführung der Injektion (Injektionsbeispiel)

Bitte besprechen Sie Ihre Injektionstechnik zuvor mit Ihrer medizinischen Fachkraft.

- 9 Hautfalte bilden und Pen Kanüle einführen.
- 10 Insulin injizieren (Druckknopf langsam bis zum Anschlag nach unten drücken).
- 11 Pen Kanüle weitere 10 Sekunden nach der Injektion in der Haut belassen.
- 12 Pen Kanüle aus der Haut entfernen und zeitgleich die Hautfalte loslassen.

Nach der Injektion

- 13 Blister auf Pen Kanüle stecken.
- 14 Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn die Pen Kanüle vom Insulin-Pen entfernen.
- 15 Pen Kanüle gemäß den lokalen Bestimmungen entsorgen.

Pen Kanülen sind Einmalprodukte!

- 16 Qualität und Sicherheit werden bei mehrmaligen Gebrauch einer Pen Kanüle vermindert.

Zeichenerklärung



Hersteller



Herstellungsdatum



Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft



Gebrauchsanweisung beachten



Haltbarkeit



Chargennummer



Nur zur einmaligen Anwendung



Sterilisiert mit Ethylenoxid



Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der Richtlinie 93/42/EWG

IME-FINE Pen Kanülen

Verfügbare Größen:

- 31G x 4 mm
- 31G x 5 mm
- 31G x 6 mm
- 31G x 8 mm
- 29G x 12 mm



Hinweis für Auslandskunden:

Adressdaten zu Ihrem lokalen Distributor finden Sie auf der Rückseite dieses Beipackzettels oder auf der Verpackung.

Markeninhaber & Vertrieb



IME-DC
Int. Medical Equipment Diabetes Care

IME-DC GmbH
Fuhmannstraße 11
95030 Hof | Germany

Tel: +49 9281 | 85 01 6-0
Fax: +49 9281 | 85 01 6-100
E-Mail: info@imedc.de
Web: www.imedc.de